


**Anwendung und besondere Sicherheitshinweise
zu kompletten Aufsatz-Zangen mit Hubergriff**

Unbedingt vor dem Einsatz der Zangen beachten!

Mit Ihrer Entscheidung, Aufsatz-Zangen aus der Produktion der Firma Gebrueder Zepf zu erwerben, haben Sie qualitativ hochwertige Instrumente erhalten. Wenn Sie folgende Punkte beachten, ist die Sicherheit der Funktion für lange Zeit sichergestellt.

Wiederaufbereitung & Pflege	Die Wiederaufbereitung (Sterilisation) & allgemeine Pflege von Instrumenten, werden in dieser Anleitung nicht weiter beschrieben. Bitte beachten Sie hierzu unsere „Gebrauchsanleitung Wiederaufbereitung“ Diese Anleitung gibt speziell für dieses Instrument, Hersteller-Hinweise für die sichere Anwendung, Besonderheiten bei der Handhabung, sowie Funktionserklärungen.
vor dem Ersteinsatz	Alle Instrumente der Firma Gebrueder Zepf werden unsteril ausgeliefert und müssen vor dem Erstgebrauch vom Anwender gereinigt und sterilisiert werden

Der Zusammenbau

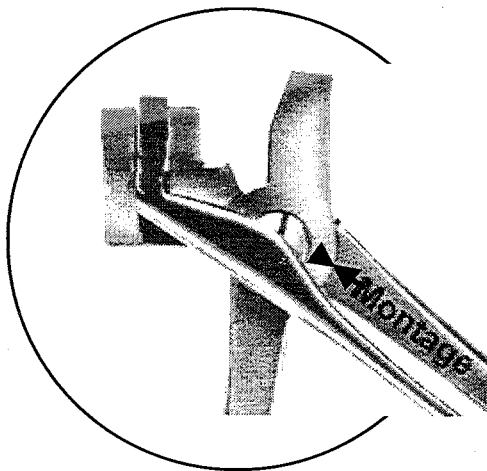

Um die langfristige Funktion der Zange zu gewährleisten, wurde eine Markierung angebracht ("Montage"), um die Montage zu erleichtern.

Der Zusammenbau funktioniert wie folgt:

- 1.) Den Riegel öffnen.
- 2.) Verlängerungsrohr in den Griff einsetzen und den Riegel schließen.
- 3.) Den Griff so weit schließen, bis die zwei Pfeile aufeinander zeigen. In dieser Position den **geschlossenen** Aufsatz auf das Gewinde des Rohres aufschrauben.
- 4.) Kontermutter festziehen, um den Aufsatz in der gewünschten Stellung zu fixieren.
- 5.) Der Schnittwinkel kann in acht verschiedenen Positionen (jeweils 45°) fixiert werden, indem das Rohr bei geöffnetem Riegel gedreht wird. **Bitte stellen Sie sicher, dass der Riegel vor Gebrauch wieder geschlossen ist.**

Material	Die Zange ist nur zum Schneiden von Gewebe, Knorpel und dgl. bestimmt.
----------	--

**08 – Formblatt
Gebrauchsanleitung**



das die Zange schneiden kann	
Überdruck am Griff	Wird auf den Griff zu viel Druck ausgeübt, kann der Innenzug brechen.
Die Federkraft des Griffes	gewünschte Federkraft mit der Rändelschraube am Griff einstellen. (>>> rechts = stärker, >>> links = leichter)
Reparaturen	Nur selten können Fehler auftreten, die einer Reparatur bedürfen, wenn Sie sich nach dieser Gebrauchsanleitung richten. Sollten Sie dennoch eine reparaturbedürftige Zange zu uns zurücksenden, möchten wir Sie bitten, die Zange vorher zu reinigen und desinfizieren.
Zusätzliche Information	Garantieansprüche für von uns gelieferte Instrumente erlöschen, wenn unsachgemäßer Umgang mit den Instrumenten festgestellt wird!
Kontakt zum Hersteller	(Adresse siehe oben) Tel.: 0049 7424 95 72 0, FAX : 0049 7424 95 72 40 email : gebr.zepf@t-online.de