



Wichtige Gebrauchs – Info für Anwender

Unbedingt vor dem Einsatz des Instrumentes beachten !

Mit Ihrer Entscheidung, Produkte aus deutscher Produktion zu erwerben, haben Sie qualitativ hochwertige Instrumente erhalten. Wenn Sie folgende Punkte beachten, ist die Sicherheit der Funktion für lange Zeit sichergestellt.

➤ Der Ersteinsatz neuer Instrumente

- Alle Instrumente der Firma Gebrueder Zepf werden unsteril ausgeliefert und müssen vor dem Erstgebrauch vom Anwender gereinigt und sterilisiert werden.

➤ Sterilisation

- Alle Instrumente können in Autoklaven sterilisiert werden. Plasmasterilisation ist bei Instrumenten mit Kunststoffteilen nicht zulässig, da der Kunststoff dabei zerstört werden kann.

➤ Sicherheitsüberprüfung

- Eine Sichtprüfung sollte vor jedem Einsatz des Instrumentes durchgeführt werden. Dabei ist auf Risse, Brüche oder mechanische Fehlfunktionen zu achten. Insbesondere sollten Sie die kritischen Stellen beachten, wie Sperren, Rasten, Schneiden, Spitzen, Schlüsse, bewegliche Teile und der Arbeitsbereich am Instrument.

➤ Reinigung und Pflege

- Die Instrumente sollten nach dem Gebrauch sofort gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Dabei sollte besonders auf die in der Sicherheitsüberprüfung erwähnten kritischen Stellen und auf schwer zugängliche Stellen geachtet werden.
- Zerlegbare Instrumente müssen unbedingt in zerlegtem Zustand gereinigt werden.
- Nach der Reinigung der Instrumente, müssen diese umgehend getrocknet werden.
- **Nach** jeder Reinigung und **vor** der Sterilisation, sollten Sie die Instrumente mit einem geeigneten und physiologisch unbedenklichen Öl behandeln. Die kritischen Bereiche sind wieder besonders zu beachten.

➤ Handhabung

- Chirurgische Instrumente sollten stets sorgfältig behandelt werden und bei Transport, Reinigung, Sterilisation, Pflege und Lagerung sollten Sie Maßnahmen zum Schutz vor Beschädigungen treffen.
- Aggressive Stoffe können Rostbildung an den Instrumenten verursachen. Das kann zu Funktionsstörungen und gar zur Zerstörung des Instrumentes führen. Besonders beim Einsatz von Säuren oder anderen scharfen Reinigungsmitteln ist auf die Hinweise des Pflegemittelherstellers zu achten.

➤ Lagerung

- Besonders wichtig ist, daß die Instrumente **trocken** gelagert werden. Außer Edelstahl- oder Aluminiumbehältnisse, eignen sich keine Metallbehälter für die Lagerung. Die direkte Einwirkung von Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Garantieansprüche, der von uns gelieferten Instrumenten, erlöschen, wenn unsachgemäßer Umgang mit den Instrumenten festgestellt wird !